

1



VAH-gelistetes Instrumentendesinfektionsmittel verwenden.

2




Herstellerhinweise beachten. Geeignete Schutzhandschuhe und -brille tragen.

3



Genau dosieren mittels Dosierhilfen und Dosiertabellen.

4

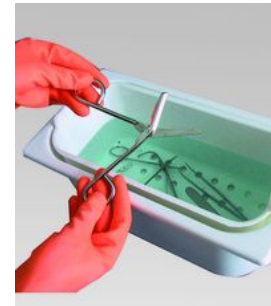

Verschmutzungen entfernen. Instrumente ggf. öffnen, in Einzelteile zerlegen. Komplett, luftblasenfrei in Desinfektionslösung eintauchen. Hohlräume durchspülen.

5



Vom Hersteller angegebene Stand- und Einwirkzeiten genau beachten.

6



Instrumente gründlich mit Trinkwasser spülen und trocknen. Auf Sauberkeit und Unversehrtheit überprüfen. Bei Bedarf sterilisieren.

7



Bei Restverschmutzungen Instrumente nochmals mit Bürste reinigen. Danach Wiederholung von 4 - 6.

**A 20 Instrumentendesinfektion - Vielseitig & schnell wirksam**



Anwendungsvideo: Instrumentendesinfektion. Bitte beachten: Vorab Risikobewertung und Einstufung nach RKI durchführen.

Einrichtung:	Instrumentendesinfektion		
Ersteller:	Prüfung:	Freigabe:	Evaluation am:
Datum: 23.05.16	Datum:	Datum:	Datum:

Erstellt in [www.hygiensystem.de](http://www.hygiensystem.de).

<i>Einrichtung:</i>	<i>Instrumentendesinfektion</i>		
<i>Ersteller:</i>	<i>Prüfung:</i>	<i>Freigabe:</i>	<i>Evaluation am:</i>
<i>Datum:</i> 23.05.16	<i>Datum:</i>	<i>Datum:</i>	<i>Datum:</i>