

1



Herstellerhinweise beachten. Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

2



Vor Gebrauch max. 20 ml Konzentrat D 10 im Auffangbehälter des Absauggeräts vorlegen.

3



Zusätzlich 2 %ige D 10-Gebrauchslösung in einem separaten Behälter ansetzen.

4



Nach jeder Anwendung Katheter entsorgen, einige ml D 10-Gebrauchslösung durch den Schlauch saugen.

5



1 x täglich kontaminierte Teile (Behälter, Schläuche etc.) vollständig bedeckt in D 10-Gebrauchslösung einlegen. (Achtung: Keine Filter!) Angegebene Einwirkzeit beachten.

6



Absauggerät vom Stromnetz trennen, äußerlich wischdesinfizieren. Einwirken lassen.

7



Eingelegte, desinfizierte Teile gründlich mit Trinkwasser spülen, erst nach Trocknung montieren und trocken lagern.

**D 10 Absaugerätedesinfektion - Auch für Inhaliergeräte**



B 15 Desinfektionstücher für die Wischdesinfektion des Gerätes. Anwendungsvideo: Absaugerätedesinfektion

Erstellt in [www.hygiensystem.de](http://www.hygiensystem.de).

Einrichtung:	Die richtige Vorgehensweise:	Absaugerätedesinfektion	
Ersteller:	Prüfung:	Freigabe:	Evaluation am:
Datum: 16.10.19	Datum:	Datum:	Datum: