

1



Herstellerhinweise beachten. Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

2



Nach Gebrauch Inhaliergerät vom Stromnetz trennen.

3



2 %ige D 10-Gebrauchslösung in Behälter ansetzen.

4



Verneblerteile (Medikamentenbecher und -düse, Verneblerhaube, Kamin, Inhaliermaske und Mundstück) abnehmen bzw. abschrauben.

5



Verneblerteile in D 10-Gebrauchslösung vollständig einlegen. Einwirkzeit genau beachten.

6



Vernebler-Handstück und Gehäuse des Geräts keinesfalls in Flüssigkeit einlegen. Äußerlich wischdesinfizieren. Einwirken lassen.

7



Eingelegte und desinfizierte Teile gründlich mit Trinkwasser spülen, erst nach Trocknung montieren und trocken lagern.

**D 10 Absaugerätedesinfektion - Auch für Inhaliergeräte**



B 15 Desinfektionstücher für die Wischdesinfektion des Gerätes. Anwendungsvideo: Inhaliergerätedesinfektion

Erstellt in [www.hygiesystem.de](http://www.hygiesystem.de).

Einrichtung:	Die richtige Vorgehensweise:	Inhaliergerätedesinfektion	
Ersteller:	Prüfung:	Freigabe:	Evaluation am:
Datum: 16.10.19	Datum:	Datum:	Datum: