

	<p>Schritt 1</p> <p>Genau Dosierangaben dem Dosierplan entnehmen.</p>		<p>Schritt 2</p> <p>Gewünschten Behälter (z. B. Eimer, Instrumentenwanne) mit klarem, kaltem Wasser bis zu ca. 2/3 der gewünschten Gesamtmenge auffüllen (s. Dosierplan). Markieren Sie vorher am Gefäß die benötigte Gesamtmenge der gebrauchsfertigen Lösung. ___ Liter</p>
	<p>Schritt 3</p> <p>Konzentrat in Dosierflasche füllen, Etikett vollständig ausfüllen, Eintragungen kontrollieren: Produkt, Charge (LOT), Haltbarkeit</p>		<p>Schritt 4</p> <p>Geschlossene Dosierflasche 1 x kippen.</p>
	<p>Schritt 5</p> <p>20 ml Konzentrat befinden sich jetzt im Dosierkopf.</p>		<p>Schritt 6</p> <p>Inhalt des Dosierkopfs in vorbereiteten Behälter gießen (siehe Schritt 2). Flasche aufrichten.</p>
	<p>Schritt 7</p> <p>___ Dosierkopffüllungen in Eimer geben. Dafür Schritt 4 bis 6 ___ mal wiederholen (s. Dosierplan). Füllen Sie das Gefäß bis zur gewünschten Gesamtmenge mit kaltem Wasser auf. Gut umrühren! Gebrauchslösung: ___ Liter, Konzentrat: ___ ml</p>	 <p>Richtig dosieren - wirksam desinfizieren</p>	<p>orochemie-Anwendungsvideos</p> <p>Videos auch unter: www.orochemie.de</p>

Erstellt in www.hygiensystem.de.

Einrichtung:	Dosieranleitung für Dosierflasche		
Ersteller:	Prüfung:	Freigabe:	Evaluation am:
Datum: 08.05.18	Datum:	Datum:	Datum: